

A&D medical UC-352BLE 連携手順

データが同期されているか定期的に確認しましょう

初回同期手順



「入力」



「機器と同期」



「機器を
追加する」



「体重計」




体重計を選択



「完了」



体重計の裏側の
ボタンを長押し

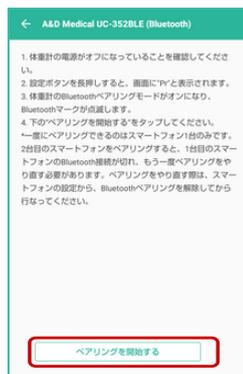

「ペアリングを開始」



「完了」を押して、
設定は終了です。

ペアリングを
失敗したら？



「もっと見る」>「アプリ・デバイス連携」>
「UC-352BLE」>「削除」>再連携へ

2回目以降は測定後、アプリを起動すると自動で同期されます。

※測定器を自動同期できるように設定
「機器設定」>「Bluetooth設定」>「ON・OFF設定」で
【通信：自動】【測定後自動送信：ON】を選択

シンクヘルスの
操作方法などに関する
お問い合わせ

シンクヘルスカスタマーサポート (平日9:00~18:00)
service.jp@health2sync.com

アプリから:「もっと見る」>「フィードバック」より送信