

アキュチェックガイドMe連携手順

データが同期されているか定期的に確認しましょう

初回同期手順




「入力」



「機器と同期」



「機器を追加する」

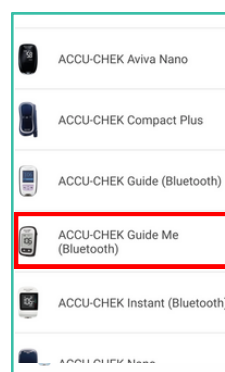


血糖測定器選択




初回同期手順



「完了」

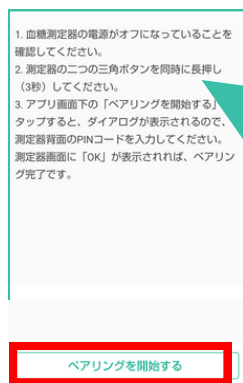



ペアリングを開始

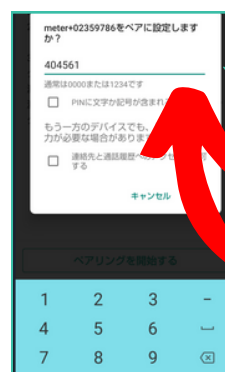

血糖測定器とアプリを
ペア設定



ペアリングに
失敗したら？

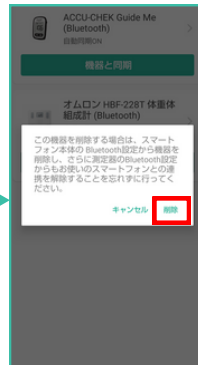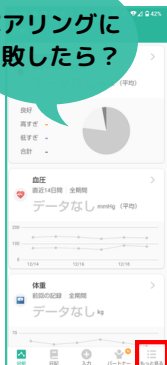

最初に戻って
連携しなおす

「もっと見る」>「アプリ・デバイス連携」>
「アキュチェックガイドMe」>「削除」>再連携へ

2回目以降の同期 (自動同期)

※測定器を自動同期できるように設定
「機器設定」>「Bluetooth設定」>「ON・OFF設定」で
【通信：自動】【測定後自動送信：ON】を選択

- ①血糖を測定（自動的にBluetooth通信が開始）
- ②スマートフォンでアプリを立ち上げる
の手順で自動同期が始まります

「Bluetooth設定」が【通信：手動】でも
測定器の「Bluetooth通信」へお進み頂いた後、
アプリを起動すると、データを同期していただけます。

シンクヘルスの
操作方法などに関する
お問い合わせ

シンクヘルスカスタマーサポート（平日9:00～18:00）
service.jp@health2sync.com

アプリから:「もっと見る」>「フィードバック」より送信