

テルモ 電子血圧計ES-P2020DZ 連携手順書



！スマートフォンのBluetoothがONになっているかご確認ください。

初回設定



「入力」




「機器と同期」



「機器を追加する」



「血圧計」▶
「テルモES-P2020DZ」

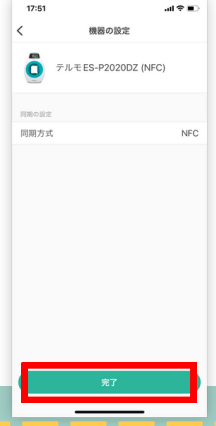

「完了」

iPhoneの場合



「同期を開始する」



スマートフォンの背面上部を血圧計にかざす



「完了」


「日記」に
反映されます

※iPhone/android共通

androidの場合



スマートフォン背面のマークを血圧計にかざす

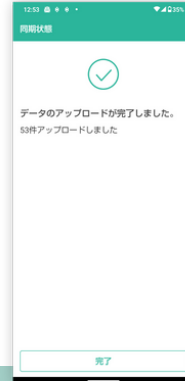

「完了」

2回目以降の同期

※iPhone/android共通

- ① 血圧を測定
- ② アプリを起動
- ③ 入力 → 機器と同期 → 該当機種を選択し、初回と同様の方法で同期

データが同期されているか「日記」を定期的に確認しましょう

シンクヘルス
操作方法に関する
お問い合わせ

シンクヘルスカスタマーサポート (平日9:00~18:00)

✉ service.jp@health2sync.com

もしくはアプリから ▶ 「もっと見る」 > 「フィードバック」より送信