

# ニプロFS Next連携手順

データが同期されているか定期的に確認しましょう

## 初回同期手順



「入力」




「機器と同期」




「機器を  
追加する」



「血糖測定器を  
選択する」

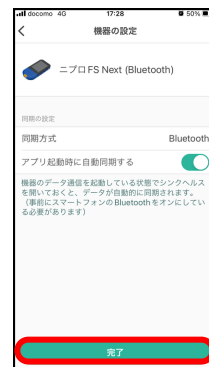

「完了」

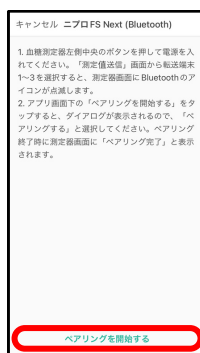


「ペアリングを  
開始する」



「完了」

測定器の中央ボタンを長押しで電源ON  
→ 「測定値送信」を選択  
→ 未登録1~3の中から任意の端末を選択

ペアリングに  
失敗したら？

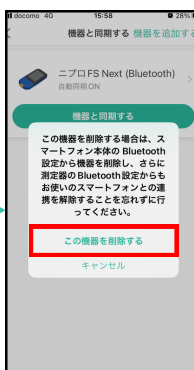

最初に戻って  
連携しなおす

「もっと見る」> 「機器と同期」> 「ニプロFS Next」> 「削除」  
下記の操作もお願いします

- ※①スマートフォン本体のBluetooth設定から削除する
- ②測定器のBluetooth設定からも連携を解除する

## 2回目以降の同期 (自動同期)

- ①血糖を測定  
(自動的にBluetooth通信が開始)
- ②スマートフォンのアプリを立ち上げる

上記手順で自動同期が始まります

シンクヘルスの  
操作方法などに関する  
お問い合わせ

シンクヘルスカスタマーサポート (平日9:00~18:00)  
service.jp@health2sync.com

アプリから: 「もっと見る」> 「フィードバック」より送信