

# メディセーフフィットの連携手順

データが同期されているか定期的に確認しましょう

## 連携手順 Android ※2回目以降も同様の手順



アプリを開く → androidのNFCマークを測定器にかざす → スキャン画面が立ち上がる → 測定器にスマートフォンをかざす → 「完了」

## 連携手順 iPhone



「入力」 → 「機器と同期」 → 「機器を追加する」  
「血糖測定器」 → 「メディセーフフィット」を選択 → 「完了」



スキャン画面が立ち上がる → iPhone上部と測定器をかざす → 「完了」

### 2回目以降の転送は？

- ① 「入力」 > 「機器と同期」
- ② 「機器と同期する」
- ③ スマートフォンを測定器にかざす

シンクヘルスの  
操作方法などに関する  
お問い合わせ

シンクヘルスカスタマーサポート（平日9:00～18:00）  
service.jp@health2sync.com  
アプリから: 「もっと見る」 > 「フィードバック」より送信