

グルテストアクア連携手順

データが同期されているか定期的に確認しましょう


連携の準備

①Bluetooth設定



スマートフォンの
Bluetooth設定をON

②測定器のモード設定

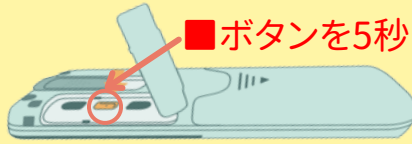

「操作モード設定」>
「操作モード」を「高機能」に設定



連携手順(初回)

アプリ画面




- ①「入力」→「機器と同期」
- ②「機器を追加する」
→「血糖測定器」
- ③グルテストアクアを選択
- ④「完了」

測定器画面



- ⑤測定器の■ボタンを5秒長押し
電源をONにする
→「機器設定」
→「Bluetooth設定」
→「デバイス登録」
→「未登録」

アプリ画面

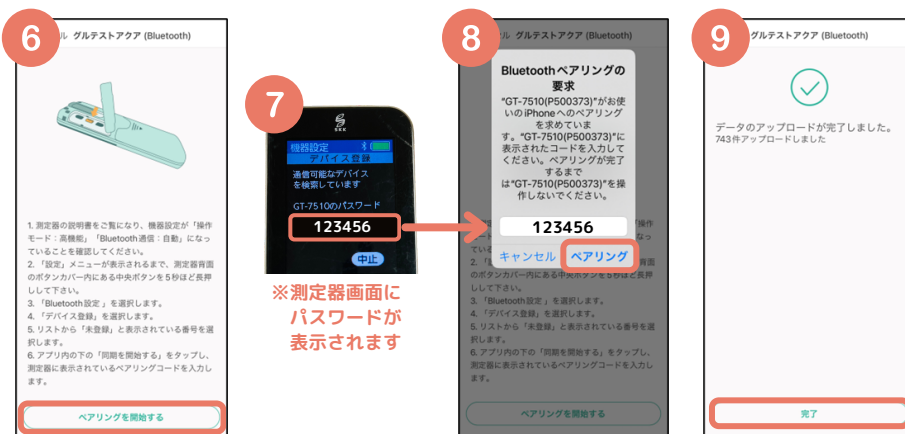

- ⑥「ペアリングを開始する」
- ⑦ 測定器画面にパスワードが表示
- ⑧ パスワードを入力し「ペアリング」
- ⑨「完了」

シンクヘルスの
操作方法などに関する
お問い合わせ

シンクヘルスカスタマーサポート (平日9:00~18:00)

service.jp@health2sync.com

アプリから:「もっと見る」>「フィードバック」より送信

2回目以降の同期（自動同期）

1.血糖測定器の設定

- ①測定器右側の■ボタンを5秒長押し「設定」画面を表示
- ②「機器設定」>「Bluetooth設定」>「通信設定」
→「通信：自動」「測定後自動送信：ON」に設定
- ③「登録」



通信：自動
測定後自動送信：ON

※手動で同期する場合は、「通信：手動」「測定後自動送信：OFF」に設定し、下記の手順で行う

- ①測定器右側の■ボタンを2秒長押し「メニュー」画面を表示>「Bluetooth通信」を選択
- ②測定器画面が「通信中」になったことを確認し、シンクヘルスアプリを立ち上げる

2.自動転送の手順

- ①血糖値を測定。
- ②測定器からチップを抜く
→自動的にデータ通信が開始
- ③測定器画面が「通信中」になったことを確認し
シンクヘルスアプリを立ち上げる



同期完了画面（シンクヘルス）



連携がうまくいかなかったとき

1.シンクヘルスから血糖測定器を削除



- ①「入力」→「機器と同期」
- ②表示されている「グルテストアクア」を
(iPhone) 左にスライドし、削除。
(android)長押し⇒「削除」

2.スマートフォン端末からBluetooth履歴を削除

iPhone



- ①「設定」
- ②「Bluetooth」
- ③「GT-7510」横のiマーク
をタップ
- ④「このデバイスの登録を解除」

Android



- ①「設定」をタップ
- ②「機器接続」
- ③「GT-7510」横の⚙️マーク
をタップ
- ④「削除」

上記2つの操作が終わったらもういちど連携操作を行ってください。