

# アキュチェックガイドとの連携手順

データが同期されているか定期的に確認しましょう

## 初回同期手順

 youtube動画はこちら




「入力」



「機器と同期」



「機器を追加する」

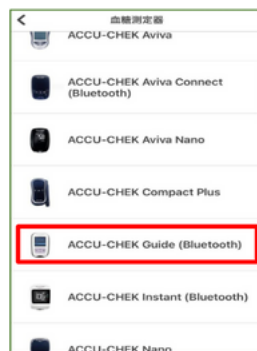

血糖測定器選択



初回同期手順



血糖測定後の自動同期手順



「完了」




「許可」



測定器の「OK」を長押し

「設定」>「無線」>「ペアリング」>「はい」の順に選択

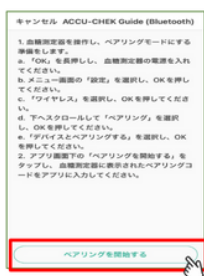

「ペアリングを開始する」をタップして、測定器に表示されている番号を入力し「ペアリング」

### ペアリングに失敗したら？

「もっと見る」>「アプリ・デバイス連携」>「アキュチェックガイド」>「削除」>再連携へ

## 2回目以降の同期 (自動同期)

- ①血糖を測定
  - ②←ボタンを押す
  - ③アプリを立ち上げる
- の手順で自動同期が始まります

もしくは血糖測定器上で「記録データ」>「データ転送」>「ワイヤレス」の手順でお進み頂いた後にアプリを起動してください。

シンクヘルスの操作方法などに関するお問い合わせ

シンクヘルスカスタマーサポート (平日9:00~18:00)  
service.jp@health2sync.com

アプリから:「もっと見る」>「フィードバック」より送信