

アキュチェックガイドとの連携手順

データが同期されているか定期的に確認しましょう

初回同期手順

 youtube動画はこちら



「入力」



「機器と同期」



「機器を
追加する」



血糖測定器選択



初回同期手順



血糖測定後の
自動同期手順



「完了」




「許可」




測定器の
「OK」を長押し

「設定」>「無線」>「ペアリング」
>「はい」の順に選択

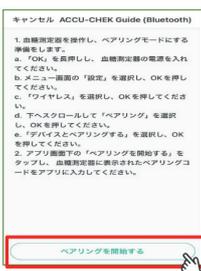

「ペアリングを開始する」をタップして、測定器に
表示されている番号を入力し「ペアリング」

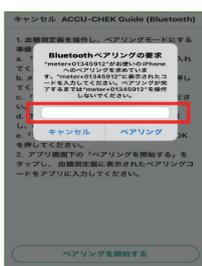

2回目以降の同期 (自動同期)

- ①血糖を測定
 - ②←ボタンを押す
 - ③アプリを立ち上げる
- の手順で自動同期が始まります

もしくは血糖測定器上で
「記録データ」>「データ転送」
>「ワイヤレス」
の手順でお進み頂いた後に
アプリを起動してください。

ペアリングに失敗したら？

- ①血糖測定器上から端末のペアリングを解除
- ②スマートフォン端末からペアリングを削除
- ③シンクヘルスアプリ「もっと見る」>「機器と同期」>「アキュチェックガイド」>「削除」→再連携へ

シンクヘルスの
操作方法などに関する
お問い合わせ

シンクヘルスカスタマーサポート (平日9:00~18:00)
service.jp@health2sync.com
アプリから:「もっと見る」>「フィードバック」より送信