



体組成計 A&D UC-421BLE 連携手順

⚠️ スマートフォンのBluetoothがONになっていることを確認しましょう。



「入力」



「機器と同期」



「機器を追加する」



「体重計」



「A&D421BLE」



「次へ」



「情報を入力し
「次へ」




「ペアリング
を開始する」




「ペアリング」



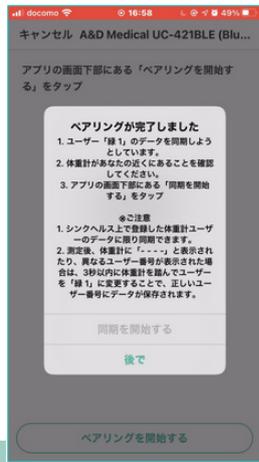

体重計のディスプレイ下に
指定の色のランプが点灯します

※異なる色が表示された場合は
3秒以内に体重計を踏むと色が変化しま
す。

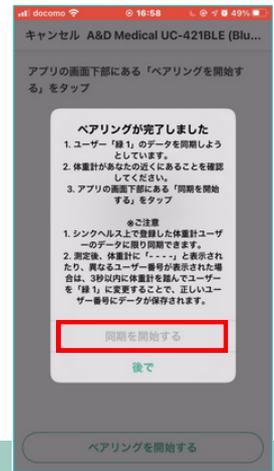

体重を測定できたら
「同期を開始する」をタップ

→ この画面が表示されたら
体重を測定する



「完了」



データが同期されているか
「日記」を定期的に確認しましょう

2回目の同期 ※自動同期



体重計に乗る
※ディスプレイ下は白いランプが点灯



測定後、体重計を降りると
自動で識別されます
※ペアリングした色のランプが点灯します

色が異なる場合は3秒以内に
体重計を踏むと色が変化します。



アプリを開くと自動で
データが同期

⚠️

- ・ A&Dの「健康管理アプリ Connect Smart」との併用はできかねます。(アカウントが2つ登録され、不具合が出る可能性があります。)
- ・ Bluetoothとの接続が不安定な場合があります。同期されるまでしばらくお待ちいただくか、複数回、同期をお試しください。

シンクヘルス
操作方方法に関する
お問い合わせ

シンクヘルスカスタマーサポート (平日9:00~18:00)

✉ service.jp@health2sync.com

もしくはアプリから ▶ 「もっと見る」 > 「フィードバック」より送信