

オムロン HBF-254Cとの連携手順

データが同期されているか定期的に確認しましょう

初回同期手順



「入力」



「機器と同期」



「機器を
追加する」



体重計を選択



ユーザー番号を > 「完了」
選択

体重計で使用している
個人番号を確認



体重計の転送スイッチ
「⚡」3秒間長押し




画面に「P」が表示



「ペアリングを開始する」



「ペア設定する」をタップ
※Androidでは「アクセスを許可する」にも✓
※Bluetooth接続に必要な操作ですが、アプリ側で情報を取得するものではありません。

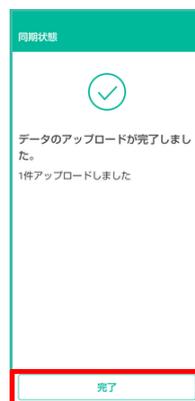

「完了」

2回目以降の同期 (自動同期)

- ① 体重計の個人番号を選択し、体重を測定
 - ② 測定器の「⚡」を押し画面に「P」が表示
 - ③ アプリを立ち上げる
- の手順で自動同期が始まります

「機器と同期する」の画面で、
体重計の項目に表示されている『機器と同期する』を
タップすると、アプリ上でも自動同期の手順を
ご確認いただけます。

シンクヘルスの
操作方法などに関する
お問い合わせ

シンクヘルスカスタマーサポート (平日9:00~18:00)
service.jp@health2sync.com

アプリから: 「もっと見る」 > 「フィードバック」より送信