

# ワンタッチベリオリフレクト連携手順



シンクヘルス

データが同期されているか定期的に確認しましょう

## 初回同期手順

【連携前の確認事項】

スマートフォンのBluetooth設定をON




「+」入力を選択




「機器と同期」



「機器を追加する」

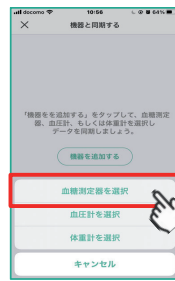

「血糖測定器を選択」

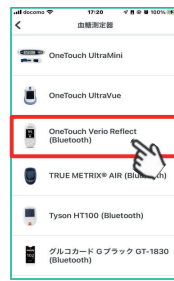

OneTouch Verio Reflect  
を選択



「完了」

マークがあるかご確認下さい。

- 【マークがない場合】  
①「設定」  
②「Bluetooth」  
③「オン」を選択




※Android端末の方は  
位置情報へのアクセスを  
「許可」する



長押し



測定器が起動するまで  
「OK」ボタンを長押し

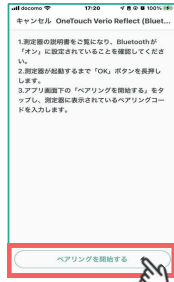

「ペアリングを  
開始する」



測定器に表示される番号を入力して  
「ペアリング」をタップ

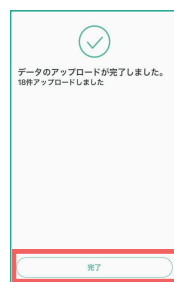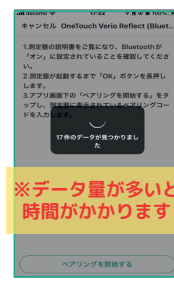


「完了」

## 2回目以降の同期

※同期が完了すると表示されます

Bluetooth通信中のマーク

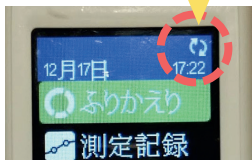

- ①血糖値を測定し、使用済みセンサーを外す  
→センサーを抜くと自動で測定器の電源がオフになります。
- ②シンクヘルスアプリを立ち上げる  
→アプリを立ち上げると同期が始まります
- ③測定器が起動するまで「OK」ボタンを長押し  
→起動するとBluetooth通信が始まります  
(右上の矢印がクルクルしていたら通信中です)

## 自動同期の設定

「アプリ起動時に自動同期する」をオン



シンクヘルスの  
操作方法などに関する  
お問い合わせ

シンクヘルスカスタマーサポート (平日9:00~18:00)  
service.jp@health2sync.com

アプリから: 「もっと見る」 > 「フィードバック」より送信