

グルコカードプライム連携手順

データが同期されているか定期的に確認しましょう


連携の準備

①Bluetooth設定



スマートフォンの
Bluetooth設定をON

②測定器のモード設定

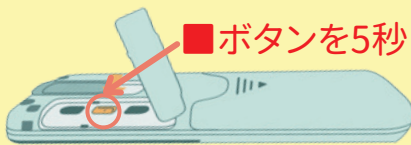

「操作モード設定」>
「操作モード」を「高機能」に設定



連携手順(初回)

アプリ画面



- ①「入力」→「機器と同期」
- ②「機器を追加する」
→「血糖測定器」
- ③グルコカードプライムを選択
- ④「完了」

測定器画面



- ⑤測定器の■ボタンを5秒長押し
電源をONにする
→「機器設定」
→「Bluetooth設定」
→「デバイス登録」
→「未登録」

アプリ画面



- ⑥「ペアリングを開始する」
- ⑦ 測定器画面にパスワードが表示
- ⑧ パスワードを入力し「ペアリング」
- ⑨「完了」

シンクヘルスの
操作方法などに関する
お問い合わせ

シンクヘルスカスタマーサポート (平日9:00~18:00)
service.jp@health2sync.com
アプリから:「もっと見る」>「フィードバック」より送信

2回目以降の同期は？

血糖測定時にアプリを開くだけで自動送信！
※血糖値測定後、使用済みのチップを外すと通信が始まります

【血糖測定器の設定】



※測定器を自動同期できるように設定
「機器設定」>
「Bluetooth設定」>「通信設定」
【通信：自動】
【測定後自動送信：ON】を選択

「Bluetooth設定」が【通信：手動】でも
測定器の「Bluetooth通信」へお進み頂いた後、
アプリを起動すると、データを同期していただけます。

【同期完了画面】


- ①血糖値を測定
(自動的にBluetooth通信が開始)
- ②スマートフォンで
アプリを立ち上げる
の手順で自動同期が始まります



「同期が完了しました」と
画面上部にコメントが
表示されます。

連携がうまくいかなかったときは？

1.まずはシンクヘルスから血糖測定器を削除

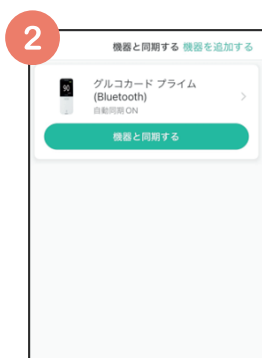


(iPhone) グルコカードプライムを左にスライドして削除
「入力」→「機器と同期」→ (android)グルコカードプライムを長押し→「削除」

2.スマートフォン端末からBluetooth履歴を削除



「設定」→「Bluetooth」
→「GT-7510」横のiマークをタップ
→「このデバイスの登録を解除」

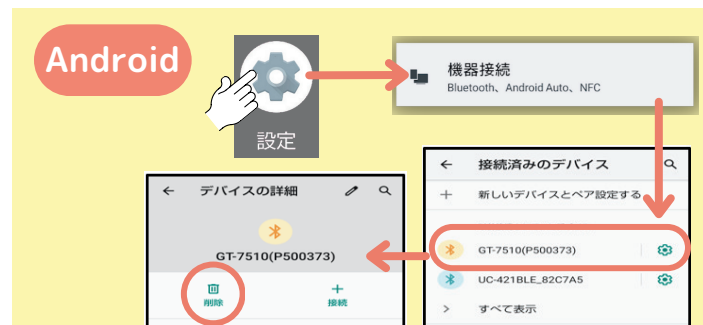

「設定」→「機器接続」
→「GT-7510」横の⚙️マークをタップ
→「削除」

上記2つの操作が終わったらもういちど連携操作を行ってください。