


# オムロンHCR-7602T 上腕式 連携手順

データが同期されているか定期的に確認しましょう

## 初回同期手順

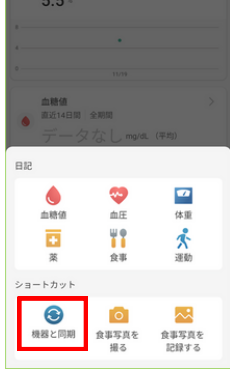

シンクヘルス

「入力」


「機器と同期」

「機器を  
追加する」

血圧計を選択





血圧計のユーザー番号

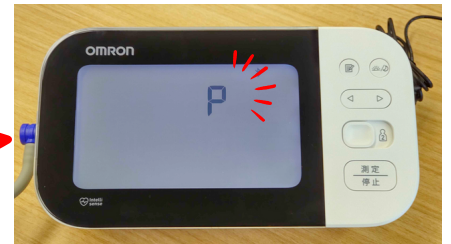


ユーザー番号を  
選択

> 「完了」

測定器の「Bluetooth」を長押し > 画面に「P」が表示

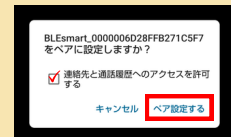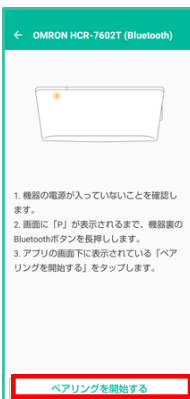

「ペア設定する」をタップ  
※Androidでは  
「アクセスを許可する」にも✓  
※Bluetooth接続に必要な操作ですが、  
アプリ側で情報を取得するものでは  
ありません。

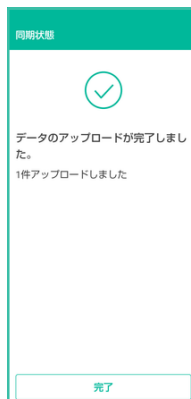

2回目以降の同期  
(自動同期)

- ①血圧を測定
  - ②測定器の「Bluetooth」を押し  
画面に「0」が表示
  - ③アプリを立ち上げる
- の手順で自動同期が始まります

「ペアリングを開始する」

「完了」

シンクヘルスの  
操作方法などに関する  
お問い合わせ

シンクヘルスカスタマーサポート (平日9:00~18:00)  
service.jp@health2sync.com

アプリから: 「もっと見る」 > 「フィードバック」より送信