

# グルコカードGブラック連携手順

データが同期されているか定期的に確認しましょう


## 連携の準備

### ①Bluetooth設定



スマートフォンのBluetooth設定をON

### ②測定器のモード設定

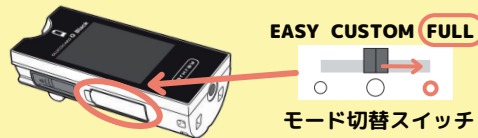

モード切替スイッチを「FULL」にする  
※芯が出ていないシャープペンシルの先などでスイッチを動かしてください

YouTube  
↓はこちら



## 初回同期手順

アプリ画面



- ①「入力」→「機器と同期」
- ②「機器を追加する」  
→「血糖測定器」
- ③グルコカードGブラックを選択
- ④「完了」

測定器画面



- ⑤測定器の■ボタンを押し電源をON  
→「機器設定」  
→「Bluetooth設定」  
→「デバイスリスト」  
→「未登録」  
→画面にパスワードが表示される

アプリ画面



- ⑥「ペアリングを同期する」
- ⑦「ペアリング」
- ⑧パスワードを入力して「OK」
- ⑨「完了」

シンクヘルスの  
操作方法などに関する  
お問い合わせ

シンクヘルスカスタマーサポート (平日9:00~18:00)  
service.jp@health2sync.com

アプリから:「もっと見る」>「フィードバック」より送信

# 2回目以降の同期は？

**血糖測定時にアプリを開くだけで自動送信！**  
※血糖値測定後、使用済みのセンサーを外すと通信が始まります

## 【血糖測定器の設定】



- ① 「機器設定」
- ② 「Bluetooth設定」
- ③ 「ON・OFF設定」の画面で  
【通信：**自動**】  
【測定後自動送信：**ON**】を選択

「Bluetooth設定」が【通信：手動】の場合は、アプリを立ち上げた状態で、測定器の「Bluetooth通信」を押すとデータを同期することができます。

## 【同期完了画面】

- ① スマートフォンでアプリを立ち上げる
- ② 血糖値を測定後センサーを外すと自動的にBluetooth通信が開始される  
→自動同期されます  
※アプリを立ち上げた状態でBluetooth通信を行う必要があります



「同期が完了しました」と画面上部にコメントが表示されます。

# 連携がうまくいかなかったときは？

## 1. まずはシンクヘルスから血糖測定器を削除



「入力」 → 「機器と同期」 → (iPhone) グルコカードGブラックを左にスライドして削除  
(Android) グルコカードGブラックを長押し → 「削除」

## 2. スマートフォン端末からBluetooth履歴を削除



「設定」 → 「Bluetooth」  
→ 「GT-1830」横のiマークをタップ  
→ 「このデバイスの登録を解除」



「設定」 → 「機器接続」  
→ 「GT-1830」横の⚙️マークをタップ  
→ 「削除」

上記2つの操作が終わったらもういちど連携操作を行ってください。