


# テルモ WT-B100DZ連携手順

データが同期されているか定期的に確認しましょう




## 同期手順

※スマートフォンのNFC(近距離無線通信)機能がONになっているかご確認ください。

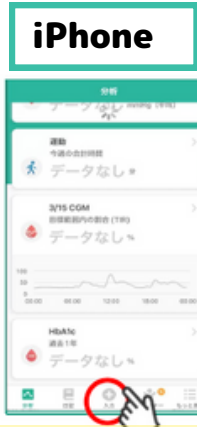

「入力」

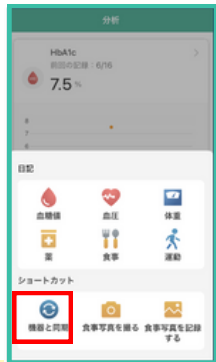

「機器と同期」



「機器を追加する」


## 初回設定




体重計を選択



「完了」

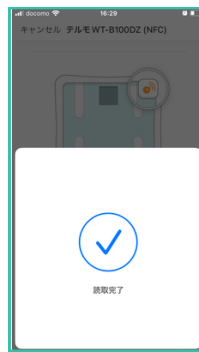

「完了」

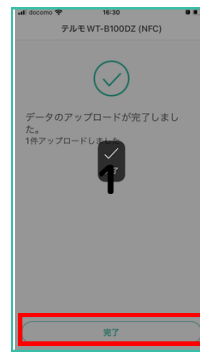


**ポイント**  
読み取り完了まで動かさないようにする。

体重計の マークにスマートフォンの背面をかざす

## android




アプリを起動

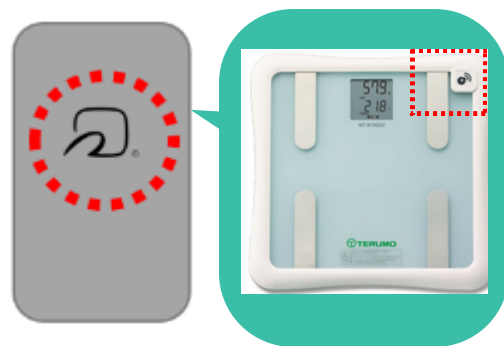

体重計の マークにスマートフォンをかざす※スマートフォンは体重計から離れているところをかざす

「完了」

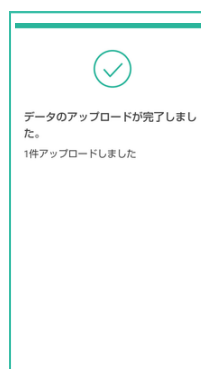

## 2回目測定以降の同期

### iPhone

- ①アプリを起動
- ③入力→機器と同期→体重計を選択
- ④iPhoneを通信部分にかざす

### android

- ①アプリを起動
- ②スマートフォンを体重計にかざす

シンクヘルスの操作方法などに関するお問い合わせ

シンクヘルスカスタマーサポート (平日9:00~18:00)  
service.jp@health2sync.com  
アプリから:「もっと見る」>「フィードバック」より送信