


NEW

シンクヘルスは インスリンペンと連携可能になりました！ 血糖値や食事・運動と共にインスリン記録を見直して あなたらしいライフスタイルを見つけましょう

スマートインスリンペン：ノボペン® 6、ノボペン エコー® プラスと連携が可能となりました。シンクヘルス上で記録した血糖値や食事、運動内容とともにインスリン量を照らし合わせて振り返ることができるようになります。


インスリンと連携した画面(イメージ)

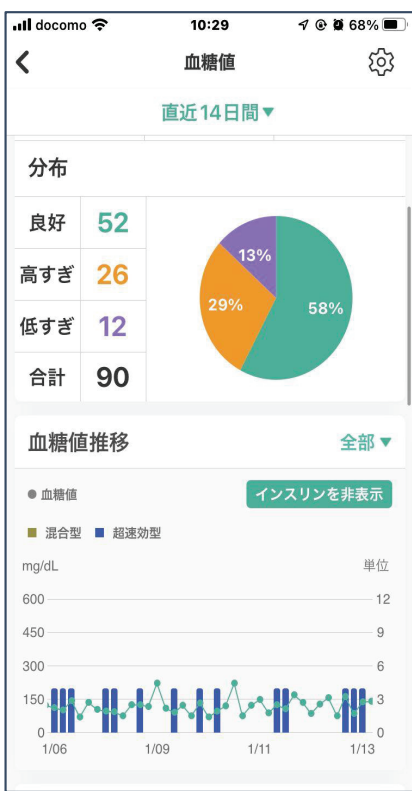

血糖値の推移とインスリンの投与状況が把握しやすい



食前・食後の血糖値差とインスリンの投与量を見直し

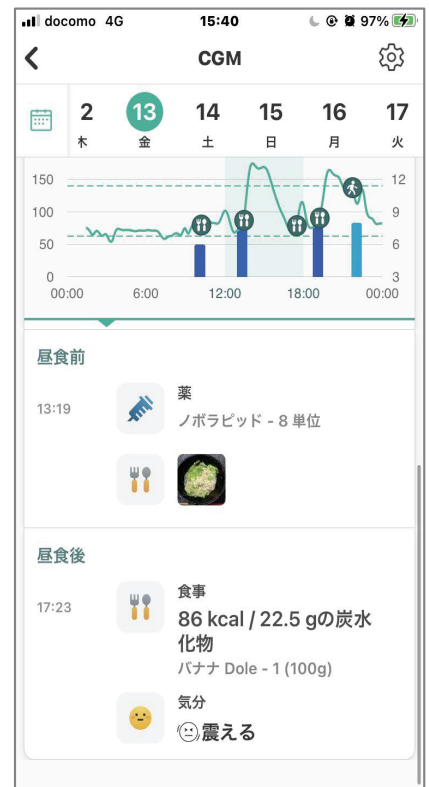

CGMとインスリン量を同時に把握

初期連携後の同期方法 複数件のデータもまとめて転送可能！

iPhone



ノボペン® 6、ノボペンエコー® プラスは、ノボ ノルディスクファーマ株式会社の登録商標です。

Android

アプリを開いて2回かざす



※端末によって通信部が異なります。ご不明な方は取扱説明書をお読みください。


初期設定:インスリンペンと同期する



①「+」を選択し「機器と同期」をタップ



②「インスリンペン」を選択

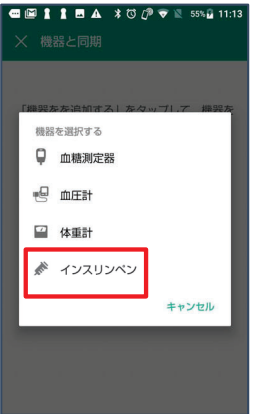

③「機器を追加する」を選択



④同期する製品を選択



⑤対象のインスリン製剤を選択



⑥インスリンの種類、製剤を確認し、「完了」を選択




⑦iPhoneの場合「スキャンの準備ができました」という画面が起動します。画面の絵のようにペンをかざします



⑦Androidの場合画面の案内に従ってスマートフォンのNFC通信部にペンの通信部をかざします




⑧読み取りが完了すると格納されているデータ件数を表示

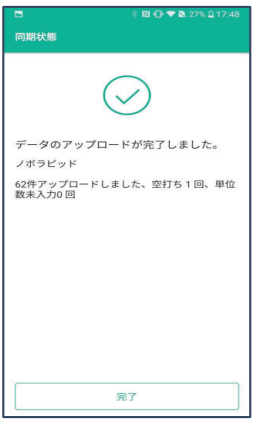

⑨完了を選択




⑩生活時間表を設定(任意)し「完了」を選択

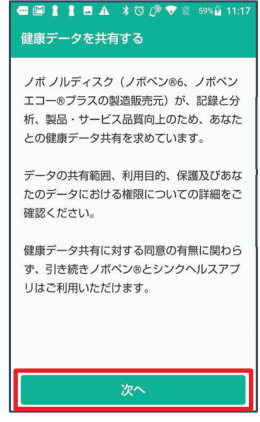

⑪データ共有同意に移行し、「次へ」を選択



⑫ 生年月日、お住いの国を選択し、「次へ」をタップ

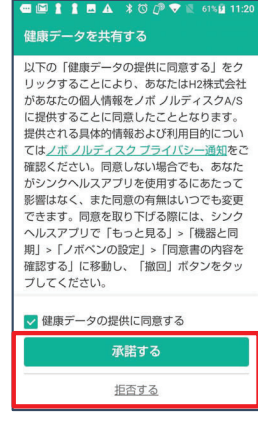

⑬ 健康データの共有を「承諾する」もしくは「拒否する」を選択 (※「拒否する」を選択してもデータの同期はできます)



シンクヘルスアプリ(以下「本アプリ」という)は、ノボ ノルディスクと共同開発されたものではなく、ノボ ノルディスクによる評価及びいかなる承認を経たものではありません。本アプリとノボペン®6やノボペン エコー®+との互換性についても、ノボ ノルディスクは評価を行ったものではありませんので、あらかじめご了承ください。本アプリはシンクヘルス株式会社により開発されたものであり、シンクヘルス株式会社はその利用目的におけるアプリの安全性とパフォーマンスについて、単独で責任を担うものとします。ノボ ノルディスクは、本アプリのコンテンツの利用、あるいは本アプリの利用を通して収集された情報の正確性について、一切責任を担うものではありませんのであらかじめご了承ください。

シンクヘルス カスタマーサポート
メールアドレス service.jp@health2sync.com
(営業時間: 平日 9:00 - 18:00)

アプリからお問合せ:「もっと見る」>「フィードバック」

シンクヘルス
ダウンロードは
こちら

