


グルコカード プラスケアの連携手順

データが同期されているか定期的に確認しましょう

連携の準備（測定器のモード設定）

1. ■ ボタンを5秒間長押し
2. 「通信設定」 > NFC 「TypeB」 選択

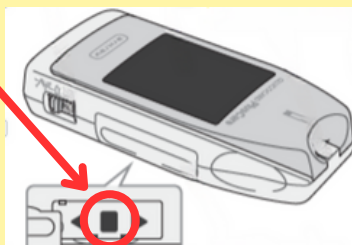

シンクヘルス

連携手順 Android



- 1 アプリを開く →
- 2 androidのNFCマークを測定器の「●」にかざす →
- 3 スキャン画面が立ち上がる



「完了」画面になるまで離さない！



- 4 測定器の「●」にスマートフォンをかざす →
- 5 データ転送 →
- 6 「完了」

・2回目以降の転送は？

①～⑥の手順を行ってください。

・データ転送に失敗したときは？

もう一度、測定器の「●」にスマートフォンをかざしてください。

連携手順 iPhone



「入力」⇒ 「機器と同期」⇒ 「機器を追加する」「血糖測定器」 ⇒ 「グルコカード プラスケア」を選択 ⇒ 「完了」




「完了」画面になるまで離さない！

スキャン画面が立ち上がる ⇒ iPhone上部と測定器の「●」をかざす ⇒ 「完了」

・2回目以降の転送は？

・データ転送に失敗したときは？

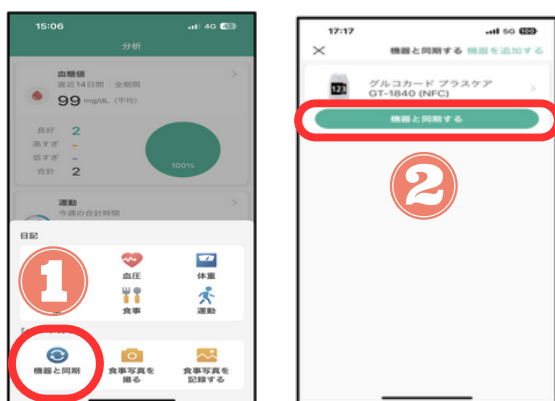

「機器と同期」 ⇒ 「機器と同期する」 ⇒ 測定器に iPhoneをかざす

もう一度、測定器の「●」に iPhoneをかざしてください

シンクヘルスの
操作方法などに関する
お問い合わせ

シンクヘルスカスタマーサポート（平日9:00～18:00）
service.jp@health2sync.com
アプリから:「もっと見る」>「フィードバック」より送信