


ニプロケアファストLink連携手順

データが同期されているか定期的に確認しましょう

初回同期手順

アプリ画面

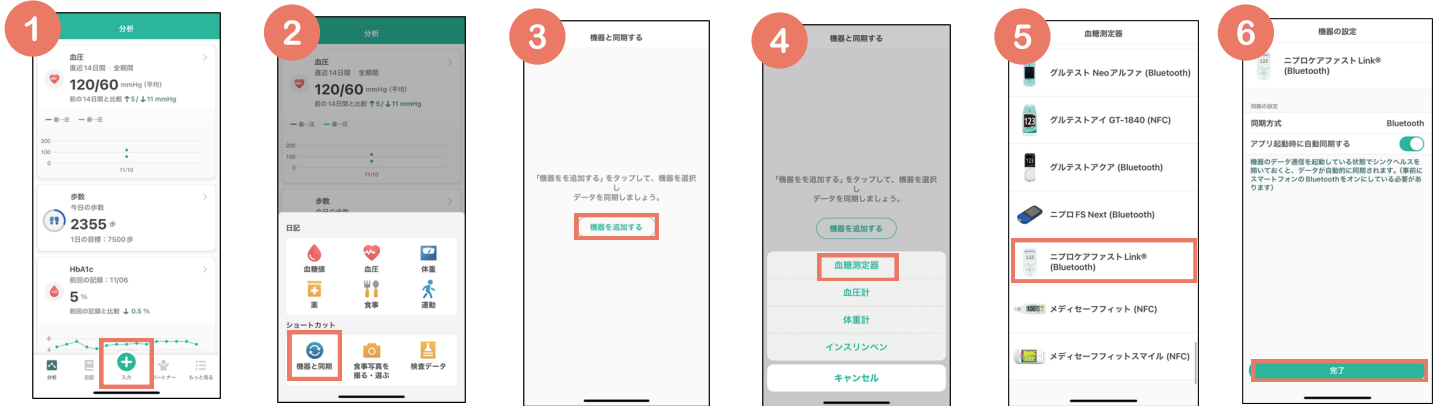

「入力」

「機器と同期」

「機器を追加する」

「血糖測定器」

「ニプロケアファスト Link」を選択

「完了」

測定器画面




「O」ボタンを3秒間長押しで電源ON、「▶」ボタン1回で「測定値を送る」を選択、「O」ボタンを1回で決定

「未登録」を選択し、「O」ボタンで決定

「はい」を選択

アプリ画面

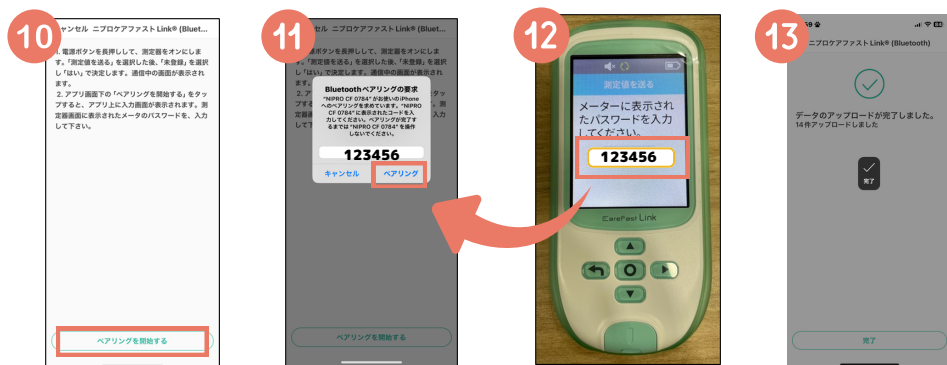

「ペアリングを開始する」

測定器に表示されたパスワードを入力

「完了」

シンクヘルスの
操作方法などに関する
お問い合わせ

シンクヘルスカスタマーサポート（平日9:00～18:00）
service.jp@health2sync.com

アプリから:「もっと見る」>「フィードバック」より送信

2回目以降の同期は？

血糖測定時にアプリを開くだけで自動送信！

※血糖値測定後、使用済みのセンサーを外すと通信が始まります

【血糖測定器の設定】

- ①「設定」
- ②「ブルートゥース」
- ③「ブルートゥース通信」
- ④「ON」を選択

【同期完了画面】

- ①スマートフォンでアプリを立ち上げる
 - ②血糖値を測定後センサーを外すと自動的にBluetooth通信が開始される → 自動同期されます
- ※アプリを立ち上げた状態でBluetooth通信を行う必要があります



「同期が完了しました」と画面上部にコメントが表示されます。

連携がうまくいかなかったときは？

1. まずはシンクヘルスから血糖測定器を削除



「入力」 → 「機器と同期」 → (iPhone) ニプロケアファストLinkを左にスライドして削除
(Android)ニプロケアファストLinkを長押し → 「削除」

2. スマートフォン端末からBluetooth履歴を削除



「設定」 → 「Bluetooth」
→ 「NIPRO CF 0784」横のiマークをタップ
→ 「このデバイスの登録を解除」

「設定」 → 「機器接続」
→ 「NIPRO CF 0784」横のギアマークをタップ
→ 「削除」

上記2つの操作が終わったらもう一度連携操作を行ってください。